


COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA



Lavarse las manos.



Agarre el respirador con la palma de la mano, dejando que las cintas caigan sobre esta.

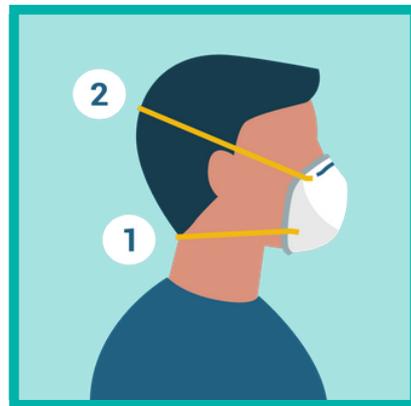

La banda superior se coloca en la parte superior de la cabeza.
La banda inferior, se coloca sobre el cuello.



Coloque la punta de los dedos de ambas manos en la parte superior del gancho de metal.
Deslice hacia abajo la punta de los dedos por ambos lados del gancho para moldearlo y que tome la forma de la nariz.



Coloque ambas manos sobre el respirador y aspire un poco de aire para revisar si el respirador se ajusta totalmente a su cara.